

Návod na použitie tréningového modelu zubov Posterior 2020

1. Tento návod slúži ako návod na použitie tréningového modelu zubov Posterior 2020 (ďalej len „Model“).
2. Tento Model nie je hračkou a je určený len na použitie osobám starším ako 18 rokov.
3. Tento Model je určený len na tréning modelácie výplní pomocou stomatologických modelovacích nástrojov.
4. Na tréning používajte plastické netvrdnúce materiály ako napr. plastelína.
5. Použiť môžete aj kompozitné výplňové materiály, pri ich použití a fotopolymerezovaní sa však model stáva **jednorazovým** a ich odstránenie bez poškodenia modelu nie je zaručené.
6. Mechanicky do modelu nezasahujte, nepoužívajte preparačné nástroje. Model nie je určený na tréning preparačných metód.
7. Tento Model skladujte pri teplote 15-25°C, na tmavom a suchom mieste. Nikdy model nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo teplotám vyšším ako 45°C. Pri vystavení Modelu priamemu slnečnému žiareniu môže dôjsť k zmene jeho farby až narušeniu štruktúry Modelu.
8. Na očistenie Modelu používajte čistú vodu, bez použitia čistiacich prostriedkov. Model vo vode iba očistite, nenechávajte ho ponorený vo vode dlhšie ako 15 minút.
9. Model je vyrobený z akrylátovej živice, ktorá u niektorých ľudí môže spôsobovať alergickú reakciu. Ak sa u Vás v minulosti vyskytli príznaky alergickej reakcie na akrylátové živice alebo chcete znížiť riziko jej výskytu, odporúčame používať pri práci a manipulácii s Modelom ochranné nitrilové rukavice.