

Návod na použitie tréningového modelu zubov Suture 2021

1. Tento návod slúži ako návod na použitie tréningového modelu zubov Suture 2021 (ďalej len „Model“).
2. Tento Model nie je hračkou a je určený len na použitie osobám starším ako 18 rokov.
3. Tento Model je určený len na tréning techník chirurgického šitia s použitím chirurgických nástrojov na to určených.
4. Na tréning techník chirurgického šitia **výrazne odporúčame** používať chirurgické šitie, ktorého vlákno je neresorbovateľné, monofilné, vyrobené z polyamidu, s pevnosťou v ťahu 5/0 alebo 6/0 v spojení s reverse cutting 3/8 ihlou veľkosti 19-26mm. Použitie tohoto typu chirurgického šitia v kombinácii so **šetrnou technikou šitia** zabezpečí dlhšiu životnosť a opakovanú použiteľnosť silikónového modelu.
5. Po zašití defektu nenechávajte stehy v defekte dlhšie ako 1 hodinu. Pri ponechaní stehov dlhší čas sa silikón v zašitej polohe fixuje, znehodnotí a nie je možné ho opätovne použiť. Stehy odporúčame vyberať pomalým a jemným ťahom.
6. Tento Model skladujte pri izbovej teplote 15-25°C, na tmavom a suchom mieste bez pôsobenia tlaku (napr. nepokladajte dva modely na seba). Nikdy model nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu alebo teplotám vyšším ako 45°C. Pri vystavení Modelu priamemu slnečnému žiareniu môže dôjsť k zmene jeho konzistencie až k narušeniu štruktúry Modelu.
7. Na očistenie Modelu používajte čistú vodu, bez použitia čistiacich prostriedkov a abrazívnych nástrojov. Model vo vode iba očistite, nenechávajte ho ponorený vo vode dlhšie ako 15 minút.
8. Model je vyrobený z priemyselného silikónu, ktorý je určený na výrobu divadelných masiek a medicínskych protetických náhrad. Silikónové materiály môžu u niektorých ľudí spôsobovať alergickú reakciu. Ak sa u Vás v minulosti vyskytli príznaky alergickej reakcie na silikónové materiály, alebo chcete znížiť riziko ich výskytu, odporúčame používať pri práci a manipulácii s Modelom ochranné nitrilové rukavice.